

# KEYDENT RETRAKTIONSFADEN

## EIN GESTRICKTER RETRAKTIONSFADEN FÜR DAS TISSUE-MANAGEMENT

**Wenn Rekonstruktionen und Kronen passen sollen,  
hängt oft alles an einem Faden: dem Retraktionsfaden.**

Eine sekundenschnelle Unterbindung des Sulcus-Fluid-Flusses spart kostbare Behandlungszeit und vermeidet Kontaminationen. In der adhäsiven Zahnheilkunde lässt sich nur so das Bonding optimieren. Durch die rasche Abdrängung der Schleimhaut lassen sich auch Präparationsgrenzen viel besser darstellen.

### Faden = Faden?

Es gibt Endlosfäden, Einzelfäden, geflochtene Fäden, gezwirnte Fäden, und, und, und... Manche Fäden sind deutlich teurer als andere, weil sie eine bessere Funktion in kürzerer Zeit versprechen. Lohnt sich aber diese Mehrausgabe? Spart man mehr durch höhere Effizienz als man in das vermeintlich bessere Produkt investieren muss?

### Qualität + kleiner Preis

Die Entscheidung zwischen geringerem Preis einerseits und höherer Qualität andererseits

muss nun nicht mehr getroffen werden: Der neue KEYDENT-Retraktionsfaden vereint beide Vorzüge in sich!

Er besteht zu 100 Prozent aus Baumwolle und ist weder gezwirnt noch geflochten: Er ist gestrickt. Unter dem Mikroskop zeigt sich ein schlauchförmiger Faden, wie von einer Mini-Strickliesel produziert.

Die Schlauchform und das lockere Maschenbild machen den Retraktionsfaden sehr flexibel: Er lässt sich leicht legen, franst nicht aus und öffnet den Sulcus optimal. Erhältlich sind die gängigen Stärken 00, 0, 1 und 2.

Der Faden kann mit FeSu-Gel oder jedem anderen hämostatischen oder adstringierenden Mittel getränkt werden. Preislich liegt der KEYDENT-Retraktionsfaden deutlich unter vergleichbaren Produkten seiner Qualitätsstufe.

**Stärke 00:**  
Geeignet als Unterfaden  
oder zur Abdrängung  
dünner, empfindlicher  
Gingiva.



**Stärke 0:**  
Geeignet als Unterfaden  
und als Standardstärke  
bei Restaurationen in  
Gingivanähe.



**Stärke 1:**  
Einsatz im Frontzahn-  
bereich und bei Prämolaren.  
Auch zum Pre-Packing  
vor der Präparation.



**Stärke 2:**  
Für Prämolare und Molare,  
für die Pre-Packing-Technik  
und als Oberfaden bei  
Zwei-Faden-Technik.

<b>Einsatzgebiet</b>	Gewebemanagement vor der Abformung
<b>Vorteile</b>	Faden franst nicht aus; quillt auf; und ist einfach zu applizieren
<b>Kurzanleitung</b>	Einbindung des KEYDENT Retraktionsfadens im Tissue-Management. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die mit 1 Gramm vorgefüllte Spritze mit Eisensulfat (Keydent FeSu-Gel sollte zusammen mit einer Wegwerfapplikatorspitze gebraucht werden.</li> <li>2. Die Spritzenkappe abziehen und die Applikatorspitze aufsetzen.</li> <li>3. Zur Erzielung der besten Ergebnisse den Spritzenkolben vor der erstmaligen Verwendung leicht herausziehen.</li> <li>4. Vorsichtig einen dünnen Geltröpfchen direkt auf den Sulkusbereich auftragen.</li> <li>5. Einen gestrickten Keydent Retraktionsfaden auswählen und in das aufgetragene Gel legen.</li> <li>6. 1-3 Minuten warten.</li> <li>7. Wenn weiterhin Blutungen auftreten, den Bereich spülen und erneut Gel auftragen. 1-3 Minuten warten.</li> <li>8. Faden entfernen. Spülen, Trocknen.</li> <li>8. Wie gewöhnlich den Abdruck nehmen.</li> </ol>



Bestellnr.	Bezeichnung	EUR
7671010	Keydent Retraktionsfaden K-000 gestrickt, 254 cm (1)	11,75
7671110	Keydent Retraktionsfaden K-0 gestrickt, 254 cm (1)	9,90
7671210	Keydent Retraktionsfaden K-0 gestrickt, 254 cm (1)	9,90
7671310	Keydent Retraktionsfaden K-1 gestrickt, 254 cm (1)	9,90
7671410	Keydent Retraktionsfaden K-2 gestrickt, 254 cm (1)	9,90

American Dental Systems GmbH Günther Jerney  
Johann-Sebastian-Bach-Straße 42 · D-85591 Vaterstetten

**Bestellung und Beratung:**  
Telefon: +49 (0) 8106/300-300 · Fax: +49 (0) 8106/300-310  
E-Mail: info@ADSystems.de · Internet: www.ADSYSTEMS.de



**AMERICAN  
Dental Systems**