

SELBSTREINIGENDER MUNDSPIEGEL UND SAUGER IN EINEM

EINWANDFREIE SICHT BEI JEDER BEHANDLUNG

Gute Sicht ist das A und O einer jeden zahnärztlichen oder prophylaktischen Behandlung. Der Keydent Rotationsspiegel hilft, diese Voraussetzung zu schaffen.

Eigenschaften

Die Spiegeloberfläche des Rotationsspiegels Rotomir wird durch die Wirkung des angeschlossenen Speichelsaugers mit einer Geschwindigkeit von rund 12.000 U/Min. gedreht – die Folge: verunreinigtes Kühlwasser, Speichel, Zement- oder Dentinspäne sowie andere Partikel werden durch die Zentrifugalkraft vom Spiegel geschleudert, worauf der im Spiegelrand integrierte Sauger diese unmittelbar entfernt. Damit wird doppelt gute Sicht gewährleistet: Der Spiegel ist jederzeit sauber und die Zahl der Instrumente im Mund wird reduziert, da Sauger und Spiegel zu einem einzigen Instrument verschmolzen sind.


Weitere Vorteile

Darüber hinaus wirkt sich die Anwendung schonend auf das Handgelenk aus und Zunge, Wange und Lippe des Patienten werden bequem abgehalten. Durch sein geringes Gewicht und seine ergonomische Form liegt der Rotationsspiegel sehr gut in der Hand.

Angenehm ist auch der niedrige Schallpegel und die Tatsache, dass der Rotationsspiegel an alle handelsüblichen Absaugeinrichtungen angeschlossen werden kann. Selbstverständlich können alle Teile leicht gereinigt und im Autoklaven sterilisiert werden.

Fazit

Der Rotationsspiegel erleichtert viele Arbeiten im Mund ungemein. Er spart Platz und verbessert die Sicht erheblich. Die Kombination von Sauger und Spiegel kommt dem Handling mit dem Besteck zu Gute und die klare Spiegeloberfläche macht eine Behandlung mit Ultraschall viel sicherer.

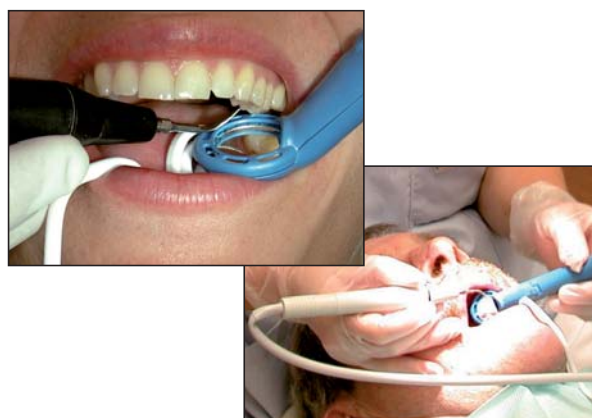

Vorteile des Rotationsspiegels

- Permanent klares Blickfeld und Absaugung.
- Erleichtert auch anspruchvollste Präparationen bei durchgängig klarer Sicht.
- Ermöglicht hervorragende Sichtverhältnisse während der Ultraschall-Zahnsteinentfernung.
- Führt zu einer deutlichen Zeitersparnis und zu einer erhöhter Produktivität.
- Vermindert Arbeitsstress und das Ermüden der Augen.
- Schafft gute Platzverhältnisse im Mund, da Sauger und Spiegel zu einem Gerät verschmolzen sind.

Bestellnr.	Bezeichnung	EUR
6100100	Keydent Rotationsspiegelset (3 Grundausstattungen mit 3 Ersatzspiegeln)	450,00
6100110	Keydent Ersatzspiegelset (5)	85,80
6100120	Keydent Ersatzabsaugerset (3)	77,00

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten.

American Dental Systems GmbH Günther Jerney
Johann-Sebastian-Bach-Straße 42 · D-85591 Vaterstetten

Bestellung und Beratung:

Telefon: +49 (0) 8106/300-300 · Fax: +49 (0) 8106/300-310
E-Mail: info@ADSystems.de · Internet: www.ADSystems.de