

BULK EZ PLUS

Dualhärtendes Bulk-Fill-Komposit

Unbegrenzte Aushärtungstiefe

Direkt kontrollierbare Schrumpfung

Nur 80 nm großer Zirkonfüller: Verbesserte Farbanpassung,
Polierbarkeit und Abrasionsfestigkeit

Kompatibel mit allen Adhäsiv-Systemen

Selbstaushärtung in 90 Sekunden

Exzellente physikalische Eigenschaften



BULK EZ PLUS

Dualhärtendes Bulk-Fill-Komposit



Zum Shop
Bulk EZ Plus

Bulk-Fill-Technik oder Schichttechnik: Sie haben die Wahl




1

Adhäsives Bonding z.B. Bisco ALL-BOND Universal® gemäß Anleitung auftragen.



2

Lufttrocknen des Adhäsivs (gemäß Anleitung).

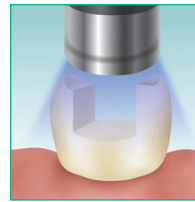


3

Lichthärten des Bondings (gemäß Anleitung).




4

Befüllen der Kavität mit Bulk EZ Plus, beginnend an der tiefsten Stelle der Präparation.

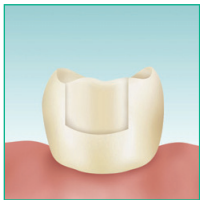


5

Bulk-Fill-Technik: Aushärtung erfolgt im Selbsthärtungsmodus innerhalb von 90 s bei 37° C. Bitte beachten: In diesem Zeitraum keinesfalls lichte härten.

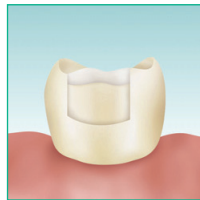

5.1

Schichttechnik: Befüllen der Kavität zu ca. 75 % mit Bulk EZ Plus. Selbstaushärtung nach 90 s (keine Lichthärtung). Anschließend Übersichtung mit einem lichthärtenden Komposit.

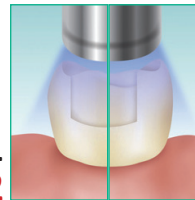

6.1
6.2

Bulk-Fill-Technik: Lichthärtung für 10 Sekunden (linke Abb.).



7

Okklusion anpassen und polieren.

Schichttechnik: Lichthärtung der Oberschicht gemäß der Anleitung des Komposits (rechte Abb.).